

Návlek na rukojeť francouzské berle



1. Použití výrobku

Návlek slouží jako vyměkčení rukojeti francouzské berle. Zabraňuje možným otlakům při dlouhodobém používání této pomůcky. Návlek je určen pro berle francouzské předloketní duralové FD 93 a FD 93 dlouhá.




2. Popis výrobku

Návlek je zhotoven z pryže, která má z jedné strany samolepící vrstvu pro snadné uchycení na rukojeti berle.

3. Nasazení výrobku

Při nasazování návleku na rukojeť postupujte následujícím způsobem:

- Z návleku se sundá papírová vrstva, která chrání samolepící plochu.
- Návlek se nalepí na rukojeť ze shora tak, aby vypouklá strana návleku směřovala ke koncové části rukojeti berle. ①
- Nakonec se návlek otočí z obou stran pod rukojeť tak ②, aby se oba konce návleku setkali ve střední části pod rukojetí. ③

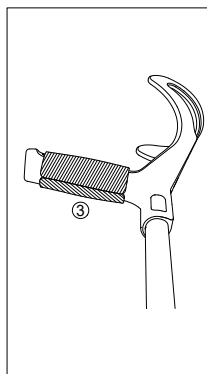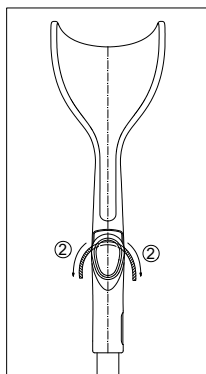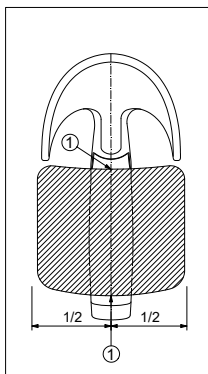

4. Hmotnost

Hmotnost návleku na rukojeť je cca $5 \text{ g} \pm 3\%$.

5. Údržba

Návlek lze otírat vodou a čistit běžnými prostředky. Po odstranění návleku je potřeba z opěrky očistit případné zbytky lepicí vrstvy. **Nesmí být použito organických rozpouštědel.**

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz




ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

VÝROBEK: NÁVLEK NA RUKOJEŤ FRANCOUZSKÉ BERLE

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení návleku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:

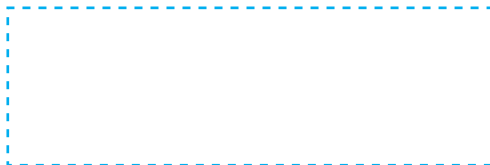

DATUM PRODEJE:

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 01.03.2020

RAZÍTKO PRODEJNY



ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz

