


Násadec protiskluzový šestihrotý

PN 0217/E/17

1. Použití výrobku

Násadec je určen pro lokomoční pomůcky k tlumení rázů při jejich používání na kluzkém terénu (sníh, náledí). Na pomůcku se nasazuje jako běžný násadec. Při dočasném užívání v interiérech se na vlastní násadec nasadí krycí miska, chránící hroty před opotřebením a podlahové krytiny před poškozením.

Je určen pro předloketní francouzské berle FD 93, FD 93 dlouhá, VERA, FDD 91, BSF 07 a hole H 81, HS 95, LYRA, HS 01. Násadec lze použít i pro lokomoční pomůcky jiných výrobců, mají-li nosník o průměru 17,75 - 18,8 mm ± 0,5.

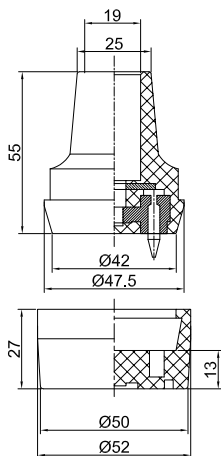

2. Popis výrobku

Násadec je dvoudílný a skládá se z:

- Vlastního násadce tvořeného plastovým tělesem s plastovou vložkou, ve které je zastříknutá ocelová vložka se šesti ocelovými protiskluzovými hroty, zabraňující jeho proražení nosníkem lokomoční pomůcky, je-li tvořen trubkou.
- Krycí misky (zabraňující poškození podlahy v interiérech) ze stejného materiálu jako těleso násadce.

3. Hmotnost

Hmotnost násadce : 110 g ± 5%

4. Rozměry

Základní rozměry viz obrázek.

5. Montáž protiskluzového násadce na hůl nebo berli

- Běžný násadec tahem za mírného pootáčení sejměte z nosníku berle nebo hole.
- Zkontrolujte stav konce nosníku a v případě, že došlo k jeho poškození (např. při proražení násadce nosníkem), zarovnejte dosedací plochu a odstraňte případný ořep pilníkem.
- Nasadte protiskluzový násadec (s nasazenou krycí miskou) na nosník berle nebo hole a tlakem proti tvrdé podložce zatlačte nosník až na dno násadce.

6. Používání protiskluzového násadce

- Na kluzkém terénu sejměte krycí misku.
- Při chůzi na bezpečném povrchu, zejména při vstupu do budov, dopravních prostředků apod. nasadte na násadec krycí misku. Zabráníte tak předčasnému opotřebení hrotů a poškození podlahových ploch.

- Kromě čištění nevyžaduje protiskluzový násadec žádnou zvláštní údržbu pouze po asi 1 měsíci užívání je třeba zkontrolovat stav protiskluzových hrotů a opotřebení krycí misky. Násadec se silně opotřebovanými hroty (výška hrotů méně než 2 mm) nebo opotřebovanou krycí miskou je třeba vyřadit z používání.

Krycí miska nasazená na protiskluzovém násadci není určena k dlouhodobému užívání, ale pouze na nezbytně nutnou dobu.

7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Poškozený nebo opotřebovaný násadec je možno odložit do sběru domovního odpadu.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: ERILENS s.r.o.
Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

VÝROBEK: Násadec protiskluzový **plastový šestihrotý**

ČÍSLO PN: 0217/E/17

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na opotřebení nástavce způsobené jeho obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb.

ZNAČKA KONTROLY:



DATUM PRODEJE:



RAZÍTKO PRODEJNY:

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 1.10.2020

 ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, CZ

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz

 ERILENS

www.erilens.cz